

Limas	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues, Switzerland	ANVISA Nº: 80745400043 (Limas ProTaper Ultimate™ Rotatórias Limas Para Odontologia), 80745400044 (Limas ProTaper Ultimate™ Manuais Limas Para Odontologia)
Pontas de Papel absorventes e Guta Percha	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604, USA	ANVISA Nº: 80745409005 (ProTaper Ultimate™ Conform Fit™ Gutta-Percha Gutta-Percha), 80745409004 (Pontas de Papel ProTaper Ultimate™ Cones de Papel Absorvente Odontológico)
Agulha de Irrigação	Produits Dentaires SA Rue des Bosquets 18, CH-1800, Vevey	"Produto ainda não registrado no Brasil. Lançamento em Breve."
Cimento AH Plus® Bioceramic	Maruchi , 2-208, Medical Industry Complex Blidg., 42-10, Taejunggongdangil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311, South Korea	"Produto ainda não registrado no Brasil. Lançamento em Breve."

CARTÃO SEQUÊNCIA BÁSICA PROTAPER ULTIMATE 1100-ARTECCO0800 Rev00

Deep
Shape
by 

MAILLEFER
ProTaper Ultimate™

Preparo

Desinfecção

Obturação

 Dentsply
Sirona

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™


PREPARO

Configurações do motor: 400 rpm / 4-5.2 Ncm

PADRÃO



Slider 016.002v

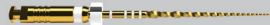

Shaper 020.004v



F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v

APENAS PARA CANAIS LARGOS E ESTREITOS



Slider 016.002v



FX 035.012v



FXL 050.010v

DESINFECÇÃO

Ao remover
qualquer lima, limpe
e irrigue com a Agulha
de Irrigação

Use SmartLite® e
Pro EndoActivator®
para remoção de
debris

Em Breve

OBTURAÇÃO

Pontas Absorventes
Cimento AH Plus® Bioceramic
Ponta de Guta Percha Conform Fit®

ACESSÓRIOS



Versão
manual
dedicada



SX
Orifice
Opener