



Ankylos®

Catálogo de Produtos

Sobre a Dentsply Sirona Implants

Melhorar a qualidade de vida do paciente requer visão, compromisso, criatividade e inovação. Uma abordagem científica aprofundada, uma dedicação à evidência clínica de longo prazo, e um forte foco no cliente. Isso permeia e inspira tudo o que fazemos, todos os dias.

Soluções abrangentes e integradas

Nossas soluções são únicas. Elas permitem flexibilidade na escolha do tratamento, com previsibilidade, facilidade, promovendo função e estética no longo prazo. O portfólio abrangente e versátil permite atender todas as soluções.

Pesquisa e desenvolvimento

Documentação é uma parte essencial do nosso investimento no desenvolvimento de nossos produtos e serviços. Nossas pesquisas e esforços em desenvolvimento se concentram em todos os aspectos que envolvem tratamentos com implantes, desde o mais simples aos mais avançados. O compromisso com a qualidade é ainda apoiada por nosso programa de estudos clínicos.

Desenvolvimento profissional

Através de atualizações de documentação, seminários, treinamentos e workshops práticos, oferecemos educação sobre as mais atuais soluções desenvolvidas em implantodontia.

Como seu parceiro de escolha, podemos apoiar a sua prática e os esforços de desenvolvimento de negócios com a conscientização do paciente e material de educação e garantia.

Nós convidamos você a se juntar a nós em nossa jornada para redefinir implantologia.

ÍNDICE

CIRURGIA

Implantes ANKYLOS®	5
Instrumentos cirúrgicos ANKYLOS®	7
Kit cirúrgico ANKYLOS®	12

PRÓTESES

MOLDAGEM DA POSIÇÃO DO IMPLANTE

Próteses /X com conexão cônica e index entre o implante e o pilar



Moldagem /X	17
Regular /X*	18
Balance Anterior /X*	20
Titanium Base /X	21

MOLDAGEM DA POSIÇÃO DO IMPLANTE

Próteses C/ com conexão cônica entre o implante e o pilar



Regular C/*	23
Pilar Provisório C/	25
Pilares cerâmicos	27
Balance Base C/*	28
Attachment Bola C/*	30

MOLDAGEM DO PILAR

Standard C/	32
Standard C/	34
SynCone® C/	36

DIGITAL

Ankylos TiBase® C/X	38
----------------------------	-----------

INSTRUMENTOS PROTÉTICOS	39
--------------------------------	-----------


MATERIAIS	43
------------------	-----------

Informações relativas aos materiais envolvidos com implantes, componentes dos sistemas e instrumentos são apresentadas em forma de número de referência após cada artigo. As fotos neste catálogo são somente ilustrativas. O tamanho dos produtos ilustrados pode desviar do tamanho dos produtos originais. A DENTSPLY Implants se reserva o direito de realizar quaisquer mudanças técnicas sem aviso prévio.

*Moldagem do pilar como opção


Implantes Ankylos®

Os implantes ANKYLOS C/X® são fornecidos em embalagem em blister com esterilização dupla com papelão externo. Este tipo de embalagem oferece máxima segurança ao produto em conformidade com os requisitos cada vez mais rígidos para dispositivos médicos. A embalagem também facilita a armazenagem de todos os produtos para fácil manuseio durante o procedimento cirúrgico.

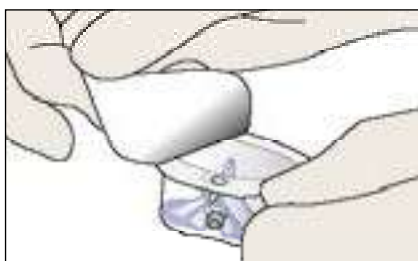

Blister interno transparente


- Embalagem interna estéril
- Contém Implante montado e Parafuso de Selamento
- Etiqueta removível com número de lote para documentação confiável do tratamento

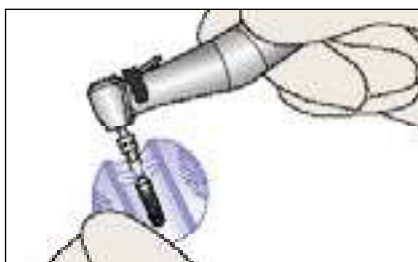

Transportador de Implante plástico

- Mantém o implante firme na embalagem e o protege contra danos
- Facilita a transferência sem contato com o implante durante a cirurgia
- Três abas com superfícies ásperas para evitar quedas e que facilitam o manuseio seguro

Ankylos Parafuso de Membrana

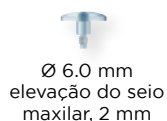

Ref.	3101 0120	3101 0140
------	-----------	-----------

Escala 1.2:1



A6.6 **A8** **A9.5** **A11** **A14** **A17**

Ø	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm	3.5 mm
Comprimentos	6.6 mm	8 mm	9.5 mm	11 mm	14 mm	17 mm
Ref.	3101 0403	3101 0405	3101 0408	3101 0410	3101 0420	3101 0422

Indicações

Substituição de um único dente

Tipos de cicatrização

- Submerso ou transgengival com formador de sulco

Escala 1.2:1



B6.6 **B8** **B9.5** **B11** **B14** **B17**

Ø	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm	4.5 mm
Comprimentos	6.6 mm	8 mm	9.5 mm	11 mm	14 mm	17 mm
Ref.	3101 0423	3101 0425	3101 0428	3101 0430	3101 0440	3101 0450

Scale 1.2:1



C6.6 **C8** **C9.5** **C11** **C14** **C17**

Ø	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Comprimentos	6.6 mm	8 mm	9.5 mm	11 mm	14 mm	17 mm
Ref.	3101 0452	3101 0453	3101 0455	3101 0458	3101 0460	3101 0470

INSTRUMENTOS


Inserção dos implantes:

ANKYLOS® Dispositivo de inserção

Desparafusamento do Cabeçote de Inserção, instalação do Parafuso de Selamento:

Chave sextavada de 1.0 mm

Instrumentos Cirúrgicos Ankylos®

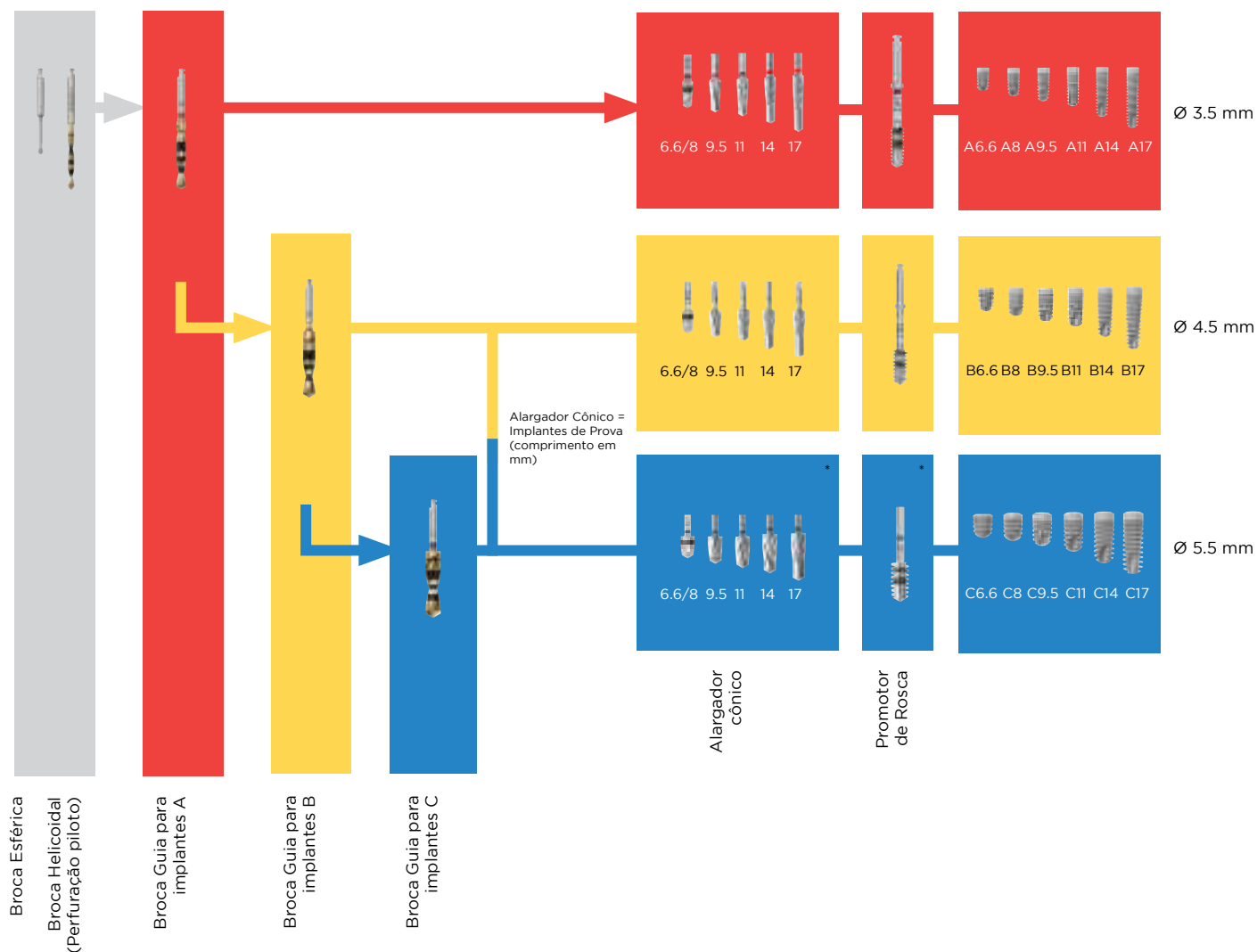

CIRURGIA

	Broca esférica ⁶	Broca Lindemann ⁶	Broca Helicoidal ⁶	Medidor de Paralelismo	Extensor de Brocas
				para Broca Lindemann	Sob encomenda
Escala 1:1					
	Ø 3 mm	l= 8 mm	l= 11 mm	Ø 2 mm	
Ref.	3103 7040	3103 7041	3103 7042	3103 7043	3103 3025 3103 3026 3103 7408

Brocas Ankylos®

ANKYLOS® Broca Guia

Escala 1:1



Comprimentos
Para implantes

Ref. Broca guia	3103 7052	3103 7053
-----------------	-----------	-----------

ANKYLOS® Broca Guia

- Para preparação do leito do implante para o diâmetro planejado
- Com irrigação interna

As Brocas Guias ANKYLOS® estão disponíveis em quatro comprimentos:

XS – para implantes de até 8 mm de comprimento > [SOB ENCOMENDA](#)

S – para implantes até 14 mm de comprimento

M – todos os comprimentos de implantes

Escala 1:1



Comprimentos
Para implantes

Ref. Broca guia	3103 7062	3103 7063
-----------------	-----------	-----------

Todos os instrumentos de corte devem ser substituídos quando desgastados ou terem sofrido danos. A utilização recomendada é de no máximo 10 vezes.

A profundidade efetiva de corte durante a preparação é levemente maior do que o comprimento especificado do implante.



A 0.4 mm	B 0.5 mm	C 0.6 mm
-------------	-------------	-------------

Diâmetro de brocas (mm)


2.9 3.8 4.7

Escala 1:1



Comprimentos
Para implantes

Ref. Broca guia	3103 7062	3103 7063
	SOB ENCOMENDA	SOB ENCOMENDA

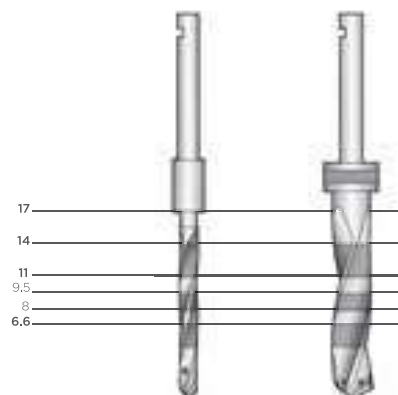

Instrumentos Cirúrgicos

ALARGADOR CÔNICO/PROMOTOR DE ROSCA

Alargador Cônico ANKYLOS®

- Para ampliar a cavidade, adaptando-a ao centro cônico dos implantes
- Um alargador por implante
- Para uso com contra-ângulo (motorizada, somente Implantes A e B) ou com catraca (manual)
- Também usado como implante de prova

Alargador Cônico ANKYLOS®

Escala 1:1



Para implantes **A6.6/A8** **A9.5** **A11** **A14** **A17**

Ref. Manual*	3103 3185	3103 3188	3103 3190	3103 3200	3103 3202
Ref. Motorizado	3103 7185	3103 7188	3103 7190	3103 7200	3103 7202

Escala 1:1



Para implantes **B6.6/B8** **B9.5** **B11** **B14** **B17**

Ref. Manual*	3103 3205	3103 3208	3103 3210	3103 3220	3103 3230
Ref. Motorizado	3103 7205	3103 7208	3103 7210	3103 7220	3103 7230


Escala 1:1



Para implantes **C6.6/C8** **C9.5** **C11** **C14** **C17**

Ref. Manual*	3103 3233	3103 3235	3103 3238	3103 3240	3103 3250
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

*Referências manuais > sob encomenda

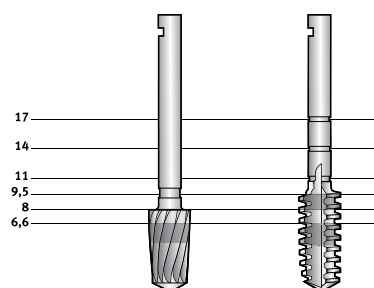

ANKYLOS® Promotor de Rosca

- Para preparação da rosca do implante ANKYLOS®
- Um promotor de rosca por diâmetro de implante
- Medida da profundidade através de marcas a laser
- Para uso com contra-ângulo (motorizada, somente Implantes A e B) ou com catraca (manual)

ANKYLOS® Promotor de Rosca⁶

Escala 1:1



Para implantes **A** **B** **C**

Ref. Manual	3103 3260	3103 3270	3103 3280
Ref. Motorizado	3103 7440	3103 7450	

CATRACA/INSTRUMENTOS DE INSERÇÃO

Catraca Cirúrgica com torquímetro

Escala Reduzida



ANKYLOS® Chave de garfo C/X



Ref.	3103 7500	3103 7502
------	-----------	-----------

Catraca Cirúrgica com torquímetro

- Para maior segurança durante a inserção manual dos implantes
- Indicador de torque legível
- Pode ser ajustada para rotação à esquerda/direita

ANKYLOS® Adaptador para catraca de instrumentos motorizados (Alargadores Cônicos e Promotores de Rosca)

Escala 1:1



curto, HXSS



médio, HXSS



longo, HXSS

ANKYLOS® Adaptador para catraca de instrumentos manuais (Alargadores Cônicos e Promotores de Rosca)



curto



médio



longo

Ref.	3103 7510	3103 7511	3103 7512	3103 3070	3103 3080	3103 3090
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Instrumentos de Inserção

Para uso com instrumentos motorizados com o sistema de fixação hexagonal (HXSS) na catraca

ANKYLOS® Adaptadores para catraca

Para uso com instrumentos manuais na catraca

ANKYLOS® Instrumento de Inserção para Implantes C/X para colocação manual

Scale 1:1



curto



médio



longo



curto



médio



longo

Order no.	3103 7531	3103 7532	3103 7533	3103 7471	3103 7472	3103 7473
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Instrumento de inserção C/X com Chave de colocação manual direta > [SOB ENCOMENDA](#)

ANKYLOS® Implant Drivers

- Para instalação de implantes ANKYLOS® C/X
- Para uso com contra-ângulo (HXSS) ou com a catraca

ANKYLOS® Instrumentos de Inserção C/X com Chave

Instalação de implantes e soltura do Cabeçote de Instalação sem alterar o instrumento

ANKYLOS® Chave Manual de adaptação Sob encomenda

Escala 1:1



ANKYLOS® Instrumento de Inserção para Implantes C/X



longo, HXSS motor

Ring Drive Ankylos (5 unidades)



longo, HXSS motor

ANKYLOS® Chave manual de Adaptação

Para segurar as inserções manuais ao invés de com catraca

Ref.	3103 3040	3103 7541	3103 7543	3103 7530
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Acessórios Ankylos®

ANKYLOS® Instrumento de Remoção do Parafuso de Selamento

- Pode ser inserido com a Chave Manual
- Instrumento para remoção segura de parafusos de selamento

Escala 1:1



curto



longo

ANKYLOS® Adaptador para chave manual⁶



Ø 7 mm

Ref.	3103 3434	3103 3435	3103 3410
------	-----------	-----------	-----------

Kit Cirúrgico Ankylos®

Ankylos Kit Cirúrgico

■ ■ motor AB

Todos os instrumentos necessários para colocação de implantes C/X, A e B ANKYLOS®

Ref.	3103 6521
------	-----------



Escala reduzida

Kit Cirúrgico Ankylos®

Kits Cirúrgicos personalizados para as suas necessidades

- Simples, flexíveis e econômicos com design modular e um número absolutamente mínimo de instrumentos necessários.
- Podem ser personalizados com módulos adicionais, conforme necessário.
- Instrumentos fixados em bases de silicone.
- Orientação clara e simples para o usuário durante a cirurgia.
- Podem ser totalmente limpos com facilidade.



ANKYLOS® Broca Helicoidal 2 mm com irrigação interna
Ref. 3103 7043



ANKYLOS® Broca esférica 3mm com irrigação interna
Ref. 3103 7040



3 ANKYLOS® Medidores de paralelismo
Ref. 3103 3026

ANKYLOS® Cabo para Inserção de catraca
Ref. 3103 3040



ANKYLOS® Extensor de Broca HXSS*
Ref. 3103 7408

ANKYLOS® Chave Manual
7 mm Ref. 3103 3410
12 mm Ref. 3103 3415

ANKYLOS® Chave Manual
Ref. 3103 3030

ANKYLOS® Chave de boca C/X
Ref. 3103 7502



ANKYLOS® Inserção de catraca para Instrumentos
curto Ref. 3103 3070



médio Ref. 3103 3080




longo Ref. 3103 3090
e 2 entradas reserva

ANKYLOS® Inserção de catraca para Instrumentos M*

médio HXSS Ref. 3103 7511 *
longo HXSS Ref. 3103 7512 *

(e 3 entradas reserva*)



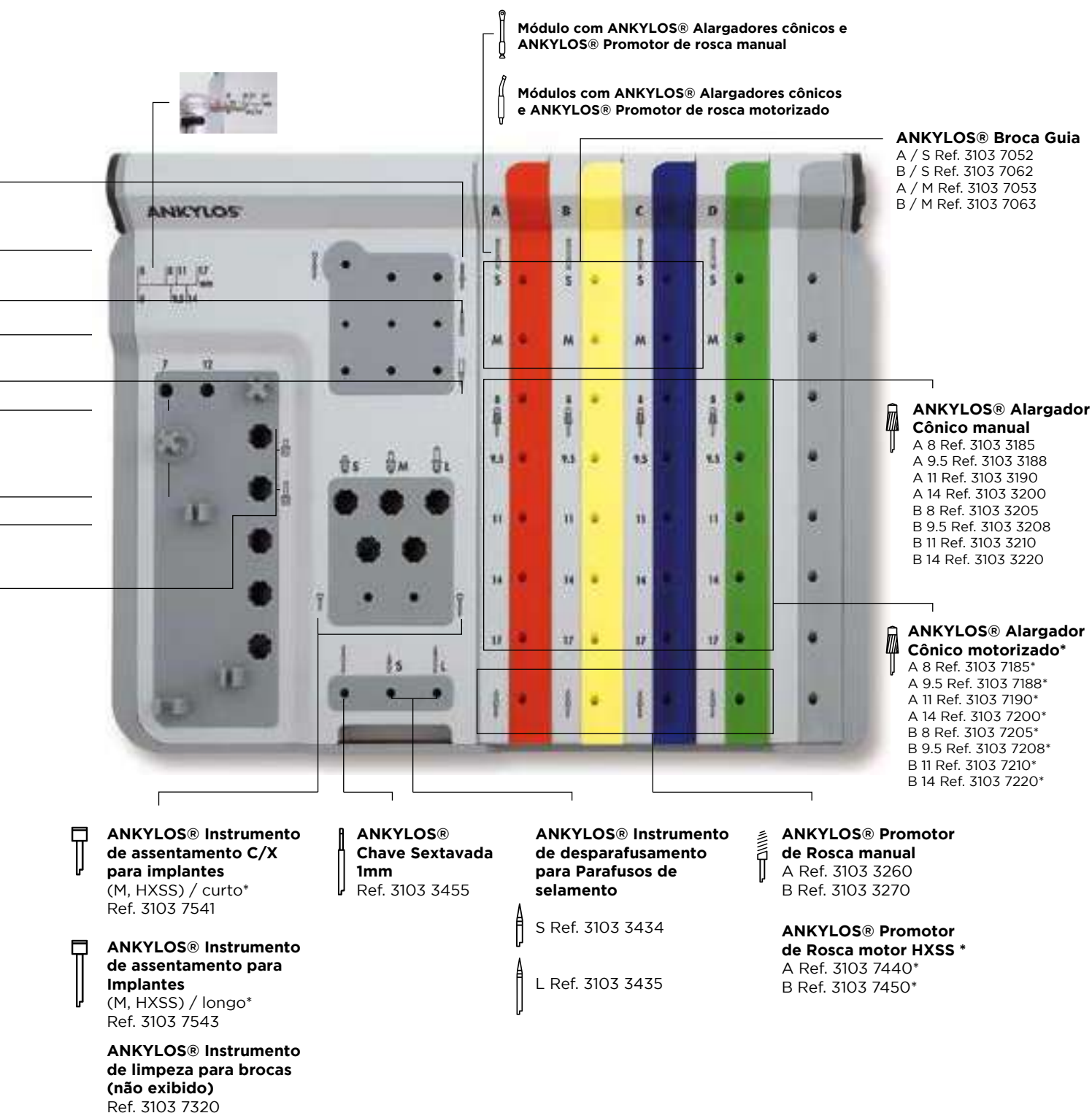

Todos os instrumentos sem asterisco são parte do ANKYLOS® Kit Cirúrgico manual AB

ANKYLOS® Kit Cirúrgico	Módulo de Ferramentas	Módulo de brocas A & B	Módulo de brocas individual (vazio)	Bandeja
motor AB	•	•	•	•

O número de furos nos módulos depende do kit.

Conceitos de Próteses C/X

FLEXÍVEL | OPÇÃO COM OU SEM INDEX

Escolha entre próteses indexadas e não indexadas com fácil posicionamento dos pilares

- Componentes indexados para fácil e distinta colocação dos pilares em seis posições

- Componentes sem index para instalação livre dos pilares

- Conexão TissueCare promove estabilidade ideal e encaixe antirotacional com todas as versões de implantes



C/



/X



Somente ANKYLOS® C/X deixa a escolha para você: use index como orientação, isso facilita o protocolo protético. Ambos os procedimentos fornecem a possibilidade de combinação livre, isto é, qualquer pilar se encaixa em qualquer implante.



Ankylos
Balance
Anterior C/X



Ankylos®
CERCON®
Balance C/



Ankylos
Regular C/X



Ankylos
Balance Base
Abutment C/




Ankylos
TiBase C/



Ankylos
Snap
Attachment C/



Ankylos
Standard C/

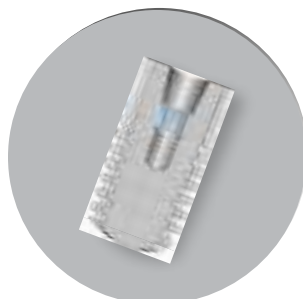

Princípios de Construção de Pilares

Formador de Sulco

A maioria dos formadores de sulcos consiste em uma peça e são inseridos com chave sextavada de 1mm no implante.

O formador de sulco Balance Anterior C/ consiste em duas peças com parafuso separado para permitir a customização e a fixação na posição desejada. Use chave sextavada de 1mm para apertar o parafuso.

Pilares Provisórios

Os Pilares Provisórios Balance C/ são feitos de PEEK reforçado em zircônio e consistem em duas peças com parafuso separado (Sextavado 1 mm).

Pilares de Transferência

Os pilares de transferência estão disponíveis para a técnica de moldeira aberta e moldeira fechada.

Os pilares de transferência C/ transferem a posição do implante sem a indexação. Os pilares de transferência /X transferem a posição do implante e a orientação da indexação. Por isso, estes são mais longos. Todos os pilares de transferência são fixados com a chave hexagonal de 1 mm.

Os pilares de transferência C/ para a técnica de moldeira aberta consistem em duas peças com parafuso separado. Os pilares de transferência C/ para moldeira fechada consistem em uma peça.

Os pilares de transferência /X sempre têm o parafuso integrado.

Pilares Protéticos

Muitos dos pilares protéticos (por exemplo, Pilares Regular) têm o parafuso integrado. O parafuso de aperto é móvel, mas não removível. Pilares com parafuso de aperto integrados são sempre parafusados com chave de sextavada de 1 mm no implante.

Pilares de peça única (por exemplo, Balance Base estreito reto) são inseridos com instrumentos especiais dependendo da cabeça do pilar.

Todos os componentes protéticos ANKYLOS® estão marcados a laser para indicar o seu uso:

- Componentes marcados com “C/” usam somente o cone para conexão e não são indexados. Isso significa que os componentes do pilar podem ser posicionados conforme desejado e são totalmente travados contra fricção pelo cone para impedir rotação.
- Componentes marcados com “/X” são indexados. A indexação é usada para posicionar os pilares nos implantes em uma das seis posições possíveis. Neste caso, o cone também garante estabilidade ideal e travamento contra rotação.
- Componentes marcados com “C/X” são usados para próteses indexadas e não indexadas.




Nota:

Implantes C/X ANKYLOS® devem ser usados somente com componentes marcados a laser com “C/X”, “C/” ou “/X”, ou que pertencem aos seguintes grupos de produtos: ANKYLOS® Balance Anterior, Balance Posterior, pilares de transferência, ANKYLOS® CERCON® Balance, Pilares Provisórios Balance, Formadores de Sulco Balance Anterior e Pilares SynCone®.

Próteses X/ (com Index)

MANIPULAÇÃO DO TECIDO MOLE E ESCOLHA DO PILAR

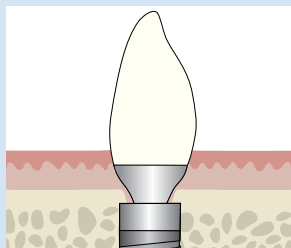


- Devido à conexão cônica, o diâmetro dos pilares ANKYLOS® no nível do implante é visivelmente menor do que o diâmetro do próprio implante.
- Os tecidos moles são localizados também abaixo do pilar.

- Por isso algumas características especiais devem ser consideradas para o contorno do tecido mole e a escolha final do pilar.




- A ilustração mostra o uso correto do formador de sulco.
- Se o nível da gengiva estiver na área entre as duas linhas pontilhadas, foi escolhido o formador de sulco correto.

- Se o nível estiver acima da linha pontilhada superior, deve ser selecionado um formador de sulco mais baixo; se estiver abaixo da linha pontilhada inferior, deve ser selecionado um formador de sulco mais alto.

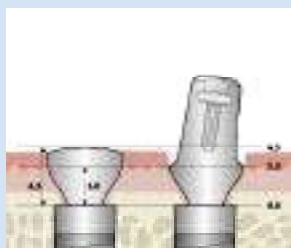


- O formador de sulco e o pilar final devem ser selecionados para corresponderem à faixa protética e à altura do sulco.
- A descrição da altura do formador de sulco como mostrado acima (GH 3.0) se refere somente à região descrita na figura ao lado. face level to the edge of the crown.

- O formador de sulco inteiro sempre está aproximadamente 1,5 mm mais alto do que a altura nominal, visto do nível de interface (aqui: altura total 4,5 mm), a fim também de formar a primeira parte do perfil da coroa.

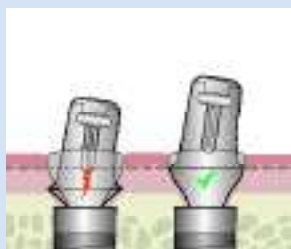


- Se a extensão do tecido mole formado for menor do que o perfil de pilar usado, isso pode resultar em uma compressão na gengiva que pode ser evitada. Este efeito ocorre quando:
1. O formador de sulco for visivelmente mais alto do que o nível da gengiva e do pilar usado posteriormente.

2. O formador de sulco for adequado para a altura da gengiva, mas a altura da gengiva do pilar final for mais baixa do que o formador de sulco usado (vide a ilustração).
3. O pilar final tem diâmetro maior do que o formador de sulco usado.

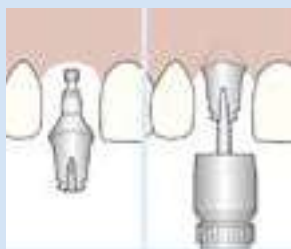

Ao transferir a conexão cônica inclusive a orientação da indexação, é possível posicionar o pilar no implante sem a chave de transferência.

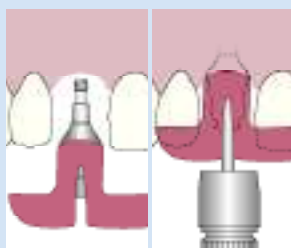

Contudo, para facilitar o manuseio, nós recomendamos o uso de chave de transferência.



Moldagem com Index

ANKYLOS® /X Pilar de Transferência⁶ (Técnica de Moldeira Aberta) com extensor de parafuso

Escala 1.2:1



curto



longo

Ref.	3104 7040	3104 7042
------	-----------	-----------

Pilar de Transferência

Para transferência da posição do implante para o modelo de trabalho com a Técnica de Moldeira Aberta

ANKYLOS® Regular C/X Pilar de Transferência⁶ (Técnica de Moldeira Fechada)

Escala 1.2:1



curto



longo

Ref.	3104 7044	3104 7046
------	-----------	-----------

ANKYLOS® Regular C/X Pilar de Transferência (Técnica de Moldeira Fechada)

Para transferência da posição do implante para o modelo de trabalho com a técnica de moldeira fechada

INSTRUMENTOS

Colocação de todos os Pilares de Transferência:

Chave sextavada de 1.0 mm

ANKYLOS® C/X Análogo de Implante

Para fixação dos componentes protéticos no modelo de trabalho

ANKYLOS® Regular C/X Análogo de Implante⁶ A

Escala 1.2:1



Ref.	3104 7011
------	-----------

Regular /X

ANKYLOS® Regular C/X Formador de Sulco

- Para contorno simples do tecido mole peri-implantar
- A seleção depende da margem gengival

ANKYLOS® Regular C/X Formador de Sulco⁴

Escala 1.2:1



GH 0.75



GH 1.5



GH 3.0



GH 4.5

Ref.	3102 4010	3102 4012	3102 4014	3102 4016
------	-----------	-----------	-----------	-----------

TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DO IMPLANTE:

Pilar de Transferência /X

TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DO PILAR:

Cap 3 em 1 com cap de transferência (somente para angulações 0° a 22.5°)

ANKYLOS® Cap 3 em 1 Regular C/X

- Para transferência da posição do pilar protético ao fazer impressões em pilares ANKYLOS® Regular C/X já instalados no implante
- Para fabricação de restauração provisória no consultório (somente em pilares não individualizados)
- Como coping de enceramento em análogos de pilares

ANKYLOS® Cap 3 em 1 Regular C/X

Escala 1.2:1



A 0



A 7.5



A 15



A 22.5

Order no.	3104 7120	3104 7121	3104 7122	3104 7123
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Análogo de Pilar Regular C/X

ANKYLOS® Análogo de Pilar Regular C/X

- Para fixação de componentes protéticos após a impressão com cap 3 em 1

Escala 1.2:1



A 0



A 7.5





A 15



A 22.5

Ref.	3104 7110	3104 7111	3104 7112	3104 7113
------	-----------	-----------	-----------	-----------

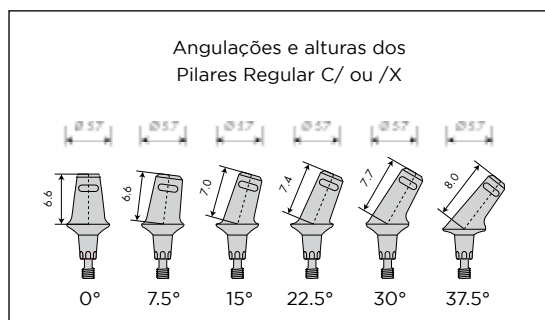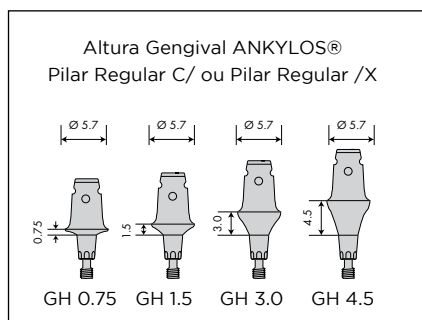

ANKYLOS® Pilar Regular /X⁴

Altura de Sulco 0.75



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5 A 30 A 37.5

Ref.	3102 4110	3102 4111	3102 4112	3102 4113	3102 4114	3102 4115
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Pilar Regular /X

- Facilmente adaptável à situação clínica com quatro alturas da gengiva e até seis angulações
- Pode ser personalizados com brocas
- Cimentável ou retido com parafusos laterais. A 30 e A 37.5 quando parafusados, sempre pela oclusal
- Disponível com ou sem index

Altura de Sulco 1.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5 A 30

Ref.	3102 4120	3102 4121	3102 4122	3102 4123	3102 4124
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INSTRUMENTOS

Instalação de Pilares ANKYLOS® Regular/X:

Chave sextavada de 1.0 mm, torque recomendado 15 Ncm

Fixação das próteses com Parafuso de Retenção Lateral (exceto A 30 e 37.5):

Chave sextavada de 1.0 mm
Torque recomendado 10 Ncm

Altura de Sulco 3.0



Scale 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5

Ref.	3102 4130	3102 4131	3102 4132	3102 4133
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Altura de Sulco 4.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5

Ref.	3102 4140	3102 4141	3102 4142	3102 4143
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Balance Anterior /X

ANKYLOS® Balance C/ Formador de Sulco

- Para contorno simples do tecido mole peri-implantar
- A seleção depende da margem gengival

INSTRUMENTOS

Colocação de Formador de Sulco:
Chave sextavada de 1.0 mm

ANKYLOS® Balance C/ Formador de Sulco⁴

Parafuso para Formadores de Sulco⁴

Escala 1.2:1

Artigo	1.5 pequeno	3.0 pequeno	1.5 grande	3.0 grande	1.5	3.0
Order no.	3102 1510	3102 1515	3102 1520	3102 1525	3102 1505	3102 1507

TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DO IMPLANTE:

Pilar de Transferência /X

ANKYLOS® Pilar Balance Anterior /X

- Para próteses unitárias e múltiplas e com demanda estética na região anterior
- Facilmente adaptável a situação clínica com dois diâmetros, duas alturas de sulco e duas angulações.
- Pode ser individualizado com brocas
- Permite próteses cimentadas ou parafusadas com parafuso lateral
- **Disponível com index**

Ankylos Balance Anterior /X⁴





Escala 1.2:1

Artigo	pequeno / 1.5 / reto Ø 5.5 / H 6.0	pequeno / 3.0 / reto Ø 5.5 / H 6.0	grande / 1.5 / reto Ø 7 / H 7.5	grande / 3.0 / reto Ø 7 / H 7.5
Ref.	3102 2710	3102 2715	3102 2750	3102 2755



Escala 1.2:1

Artigo	pequeno / 1.5 / 15° Ø 5.5 / H 6.5	pequeno / 3.0 / 15° Ø 5.5 / H 6.5	grande / 1.5 / 15° Ø 7 / H 7.5	grande / 3.0 / 15° Ø 7 / H 7.5
Ref.	3102 2730	3102 2735	3102 2770	3102 2775

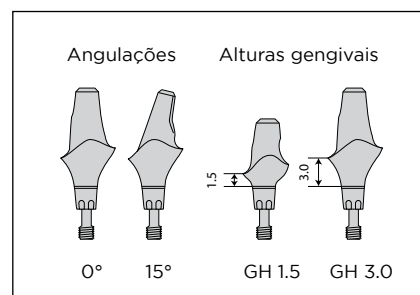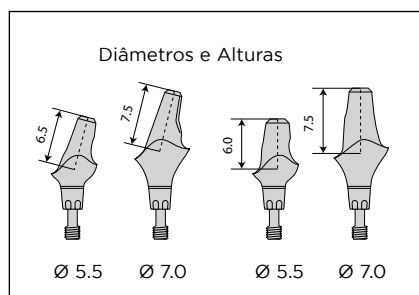



TitaniumBase /X

Ankylos TitaniumBase⁴



Escala 1.2:1

Artigo

/X

/X alto

/X

/X alto

Ref.	3102 2646	3102 2656	3102 2648	3102 2658
------	-----------	-----------	-----------	-----------


Ankylos ScanBase^{24, 4}

Ankylos TitaniumBase

- Para a fabricação de pilares cerâmicos em design individual
- Base de titânio com conexão implante-pilar pré-fabricada
- Dois lados paralelos para impedir rotação
- Disponível com index


Ankylos ScanBase

- Para scaneamento da geometria do pilar
- O mesmo design do TitaniumBase, feito de PEEK (plástico), dispensa a aplicação de Scanspray ou pó
- Pode ser usado com todos os scanners dentais comuns

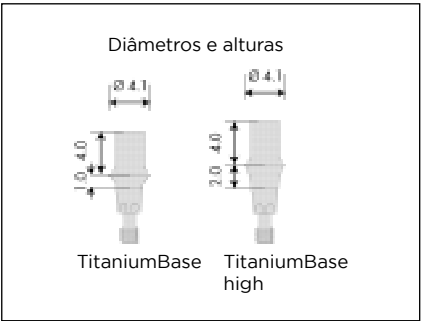

Próteses C/ (sem Index)

MANIPULAÇÃO DO TECIDO MOLE E ESCOLHA DO PILAR

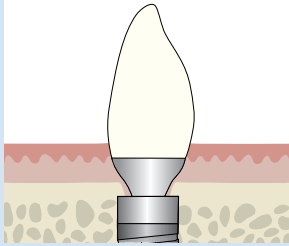


- Devido à conexão cônica, o diâmetro dos pilares ANKYLOS® no nível de implante é visivelmente menor do que o diâmetro do próprio implante.
- Os tecidos moles são localizados também abaixo do pilar.

- Por isso algumas características especiais devem ser consideradas para o contorno do tecido mole e a escolha final do pilar




- A ilustração mostra o uso correto do formador de gengiva.
- Se o nível da gengival estiver na área entre as duas linhas pontilhadas, foi escolhido o formador de sulco correto.

- Se o nível estiver acima da linha pontilhada superior, deve ser selecionado um formador de sulco mais baixo; se estiver abaixo da linha pontilhada inferior, deve ser selecionado um formador de sulco mais alto.

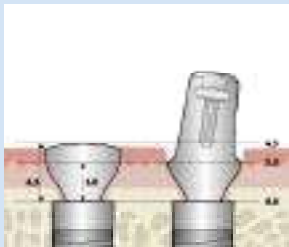


- O formador de sulco e o pilar final devem ser selecionados para corresponderem à faixa protética e a altura da gengiva.
- A descrição da altura do formador de sulco como mostrado acima (GH 3.0) refere-se somente à região do nível da interface até a borda da coroa.

- O formador de sulco inteiro sempre está aproximadamente 1,5 mm mais alto do que a altura nominal, visto do nível de interface (aqui: altura total 4,5 mm), a fim de formar a primeira parte do perfil da coroa também.

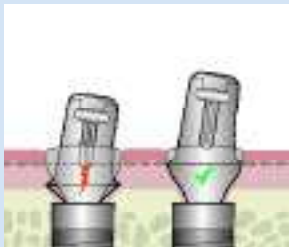

- Se a extensão do tecido mole formado for menor do que o perfil do pilar usado, isso pode resultar em uma compressão na gengiva que deve ser evitada. Este efeito ocorre quando:
1. O formador de sulco for visivelmente mais alto do que o nível da gengiva e que o pilar usado posteriormente.

2. O formador de sulco for adequado para a altura da gengiva, mas a altura de sulco do pilar final for mais baixa do que o formador de sulco usado (vide a ilustração).
3. O pilar final tem diâmetro maior do que o formador de sulco usado (por exemplo, diâmetro protético diferente).

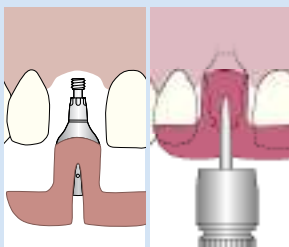

- Ao transferir a conexão cônica sem a orientação do index, não é possível instalar o pilar no implante sem a chave de transferência.

Regular C/

Ankylos Regular C/X Formador de Sulco

- Para contorno simples do tecido mole peri-implantar
- A seleção depende da margem gengival

ANKYLOS® Regular C/X Formador de Sulco⁴

Escala 1.2:1



GH 0.75



GH 1.5



GH 3.0



GH 4.5

Ref.	3102 4010	3102 4012	3102 4014	3102 4016
------	-----------	-----------	-----------	-----------

TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DO IMPLANTE:

Pilar de Transferência /X

TRANSFERÊNCIA DA POSIÇÃO DO PILAR:

Cap 3 em 1 de transferência (somente para angulações 0°-22.5°)

Ankylos Regular C/X 3-in-1 Cap

- Para transferência da posição do pilar protético ao fazer impressões em pilares ANKYLOS® Regular C/X já instalados em boca
- Para fabricação de uma restauração provisória (somente em pilares não individualizados)
- Como coping de enceramento em análogos de pilares

Ankylos Regular C/X Cap 3 em 1

Escala 1.2:1



A 0



A 7.5



A 15



A 22.5

Ref.	3104 7120	3104 7121	3104 7122	3104 7123
------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Regular C/X Análogo de Pilar

Para fixação de componentes protéticos após a impressão com Cap 3 em 1

ANKYLOS® Regular C/X Análogo de Pilar⁶

Escala 1.2:1



A 0



A 7.5





A 15



A 22.5

Ref.	3104 7110	3104 7111	3104 7112	3104 7113
------	-----------	-----------	-----------	-----------

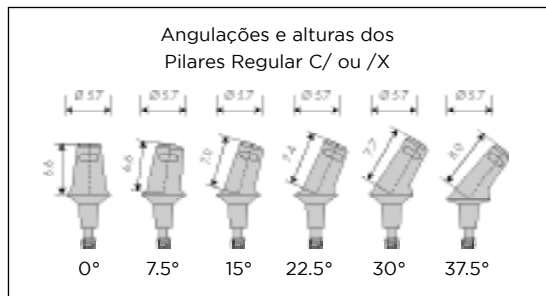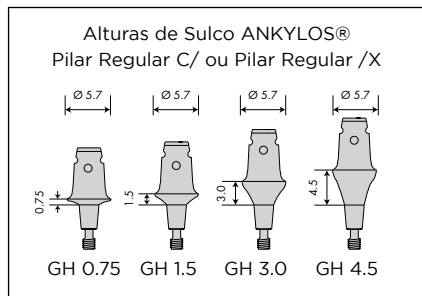

ANKYLOS® Pilar Regular C/4

Altura do sulco 0.75



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5 A 30 A 37.5

Ref.	3102 4150	3102 4151	3102 4152	3102 4153	3102 4154	3102 4155
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Pilar Regular C/

- Facilmente adaptável à situação clínica com quatro alturas de sulco e até seis angulações
- Pode ser individualizado através de brocas
- Permite próteses cimentadas ou parafusadas lateralmente. Para as angulações A 30 e A 37.5, o parafusamento é oclusal.

• Disponível com ou sem index

Altura do Sulco 1.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5 A 30

Ref.	3102 4160	3102 4161	3102 4162	3102 4163	3102 4164
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INSTRUMENTOS

Instalação de Pilares ANKYLOS® Regular C/:

Chave sextavada de 1.0 mm, torque recomendado 15 Ncm

Prótese Fixas com Parafuso Lateral (exceto A 30 e 37.5):

Chave sextavada de 1.0 mm

Torque recomendado 10 Ncm

Altura do Sulco 3.0



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5

Ref.	3102 4170	3102 4171	3102 4172	3102 4173
------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Anel para Parafuso de Fixação Lateral M 1.4¹⁴



3105 6304

Altura do Sulco 4.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0 A 7.5 A 15 A 22.5

Ref.	3102 4180	3102 4181	3102 4182	3102 4183
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Balance Base, Conceito SmartFix™

ANKYLOS® Formador de Sulco C/ D 4.24⁴



Escala 1.2:1

GH 0.75

GH 1.5

GH 3.0

GH 4.5

Ref.

3102 2510

3102 2512

3102 2514

3102 2516

Manuseio Seguro

Os componentes do pilar são pré-montados em um Instrumento de Assentamento. A inserção do pilar Balance Base angulado é facilitada pelo Instrumento de Assentamento curto e flexível, especialmente quando o espaço for limitado

Coping pré-fabricado para Pilar ANKYLOS® Balance Base C/

- Para simples fabricação de restaurações protéticas sem troca de pilares na boca do paciente
- A rosca superior permite a utilização dos Parafusos de Fixação Oclusal 3105 6022/24/25 com Coping para Pilar Balance Base estreito



ANKYLOS® Cap de Proteção para Pilar Balance Base estreito

- Para contorno do tecido mole peri-implantar do Pilar Balance Base C/ estreito
- Para cobrir o Pilar Base estreito na boca do paciente durante a fase laboratorial

ANKYLOS® Análogo de Pilar Balance Base estreito



Escala 1.2:1

Ref.

3104 5332

ANKYLOS® Cap de Proteção para Pilar Balance Base estreito⁴



3102 2590

ANKYLOS® Coping de enceramento para Pilar Balance Base estreito

- Para transferência simplificada do pilar
- Utilizada com o parafuso de fixação oclusal 3105 6025 para moldagem com moldeira aberta

ANKYLOS® Coping de Transferência e Retenção Provisória para Pilar Balance Base estreito⁴



Escala 1.2:1

Ref.

3105 6216

ANKYLOS® Coping de enceramento para Pilar Balance Base estreito²⁰



3104 5322

ANKYLOS® Pilar Balance Base C/ estreito⁴.

Altura do Sulco 0.75



Escala 1.2:1

Angulação



A 0

Ref.

3102 2520

Altura do Sulco 1.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0

Ref.

3102 2530

Altura do Sulco 3.0



Escala 1.2:1

Angulação



A 0



A 15



A 30

Ref.

3102 2540

3102 2542

3102 2546

Altura do Sulco 4.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0



A 15



A 30

Ref.

3102 2550

3102 2552

3102 2556

Escala 1.5:1

curto
(azul anodizado)extra long
(com 5 mm)

Ref.

3105 6022


3105 6025

ANKYLOS® Pilar Balance Base C/ estreito

- Para fixação de sobre-dentaduras em construções de barra
- Também como opção para fabricação simples e direta de próteses múltiplas parafusadas
- Base para sobre-dentaduras e próteses com barras fabricadas em CAD/CAM
- Somente para próteses parafusadas pela oclusal

Nota:

- Pilares Balance Base devem ser usados em próteses múltiplas e não são adequados para supra-estruturas cimentadas.
- Restaurações unitárias não são indicadas.

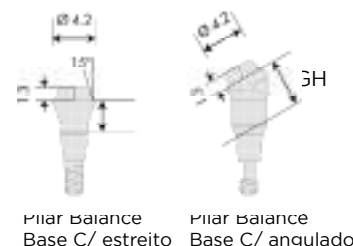Diâmetros e alturasPilar Balance
Base C/ estreitoPilar Balance
Base C/ angulado**INSTRUMENTOS****Instalação do Pilar Balance Base C/ ANKYLOS®:**

Chave para Catraca protética, 1.8 mm sextavada, torque recomendado 25 Ncm


Instalação do Parafuso de Fixação Oclusal:

Chave sextavada de 1.0 mm, torque recomendado 10 Ncm

Attachment Bola C/

ANKYLOS® Pilar Attachment Bola C/

- Utilizado em mandíbula edêntula com dois implantes instalados
- Fabricação da restauração no consultório ou no laboratório

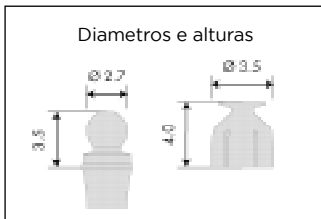

ANKYLOS® Pilar Attachment Bola C/



Escala 1.2:1



a / 1.5



a / 3.0



a / 4.5

Ref. com matriz	3102 1300	3102 1310	3102 1320
Ref. com matriz	3102 1301	3102 1311	3102 1321

INSTRUMENTOS

Instalação do Pilar Attachment Bola ANKYLOS®:

Chave de Torque para Attachment Bola, torque recomendado 25 Ncm

Ativação/Desativação da Matriz para Encaixe:

Ativação/Desativação do Instrumento para a Matriz para Encaixe

ANKYLOS® Matriz para Encaixe¹⁴

ANKYLOS® Análogo de Laboratório⁶ para Pilar Attachment Bola (sob encomenda)

Escala 1.2:1



Ref.	3102 1312	3104 5220
------	-----------	-----------

Pilar sem Altura Gengival

Restaurações Protéticas com Gengiva Extremamente Fina

ANKYLOS® Componentes com altura de sulco zero

Para casos de restauração com mucosa alveolar extremamente fina

ANKYLOS® Pilar Balance Posterior 0.0

ANKYLOS® Regular C/X Análogo de Implante⁶

Escala 1.2:1



0.0 / reto



para implantes A



para implantes B



para implantes C

Ref.	3102 1445	3104 7011	3104 7012	3104 7013
------	-----------	-----------	-----------	-----------

Standard C/

Para reconstrução simples e econômica de espaços edêntulos e extremidades livres edêntulas com próteses unitárias ou múltiplas

ANKYLOS® Pilares Standard C/ estão disponíveis somente sem indexação

ANKYLOS® Standard C/ Formador de Sulco

- Para contorno simples do tecido mole peri-implantar
- São selecionados dependendo da altura de sulco e do diâmetro a ou b do pilar planejado

INSTRUMENTOS

Instalação do Formador de sulco:


Chave sextavada de 1.0 mm

ANKYLOS® Standard C / Formador de Sulco ⁴


Escala 1.2:1

Artigo	a / 1.5 compact	a / 3.0 compact	a / 4.5 compact	a / 6.0 compact	b / 1.5 compact	b / 3.0 compact
Ref.	3102 1011	3102 1021	3102 1026	3102 1028	3102 1031	3102 1041


Diâmetros

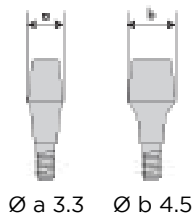

Alturas Gengivais

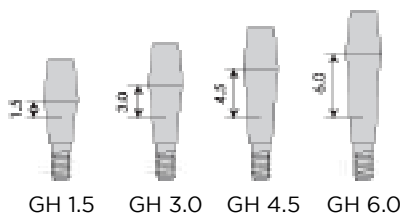

Angulations and head heights

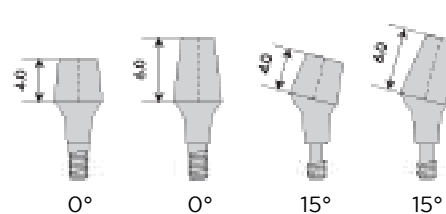

Pilares pré-angulados

Os Pilares Standard de 15° são instalados na posição correta com uma chave de posicionamento para pilares pré-angulados e fixos aplicando 15 Ncm ao parafuso de tensão. Chave: sextavada 1.0 mm. As supra-estruturas são retidas pelo parafuso lateral M1 X 0.2 ou através de cimentos odontológicos.



Escala 1.2:1



Artigo a/1.5/4.0 15° a/1.5/6.0 15° a/3.0/4.0 15° a/3.0/6.0 15°

Ref.	3102 1130	3102 1140	3102 1150	3102 1160
------	-----------	-----------	-----------	-----------



Escala 1.2:1



Artigo b/1.5/4.0 15° b/1.5/6.0 15° b/3.0/4.0 15° b/3.0/6.0 15°

Ref.	3102 1170	3102 1180	3102 1190	3102 1200
------	-----------	-----------	-----------	-----------

INSTRUMENTOS

Instalação do Pilar Standard C/ angulado ANKYLOS®:

Chave sextavada de 1,0mm, torque recomendado 15 Ncm

Fixação de próteses unitárias ou múltiplas com parafusos de retenção oclusal ou lateral:

Chave sextavada de 1,0mm, torque recomendado 10 Ncm

ANKYLOS® Pilar Standard C/4

Pilares Retos

Os pilares retos Standard são inseridos com as chaves de inserção para pilares "a" ou pilares "b". A rosca oclusal M 1.6 é usada para fixar a supra-estrutura sobre o pilar



Escala 1.2:1



Artigo a/1.5/4.0 a/1.5/6.0 a/3.0/4.0 a/4.5/4.0 a/6.0/4.0 a/3.0/6.0

Ref.	3102 1050	3102 1060	3102 1070	3102 1076	3102 1078	3102 1080
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ankylos Pilar Standard C/

- Alta flexibilidade com vários tamanhos e duas angulações
- Seleção do pilar na cadeira, os pilares permanecem na boca dos pacientes
- Moldagem exclusiva do Pilar
- Próteses podem ser cimentadas ou parafusadas (oclusal para pilares retos, lateral para pilares angulados)



Escala 1.2:1



Artigo b/1.5/4.0 b/1.5/6.0 b/3.0/4.0 b/3.0/6.0

Ref.	3102 1090	3102 1100	3102 1110	3102 1120
------	-----------	-----------	-----------	-----------

INSTRUMENTOS

Instalação do Pilar Standard C/ reto ANKYLOS®:

Chave de Inserção para Pilares a e b, torque recomendado 25 Ncm

Standard C/

COMPONENTES PROTÉTICOS PILAR STANDARD C/

ANKYLOS® Cap de Transferência Standard

- Para transferência da posição do pilar para o modelo de trabalho
- Fixado no pilar por encaixe, em pilares retos também com o parafuso de encerramento longo (moldagem com moldeira aberta)

ANKYLOS® Cap de Transferência Standard²⁷

Escala 1.2:1



a / 1.5 / 4.0
a / 3.0 / 4.0



a / 1.5 / 6.0
a / 3.0 / 6.0




b / 1.5 / 4.0
b / 3.0 / 4.0



b / 1.5 / 6.0
b / 3.0 / 6.0


Ref.	3104 5011	3104 5021	3104 5031	3104 5041
------	-----------	-----------	-----------	-----------

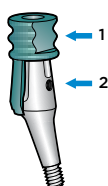

Nota:

Pilares angulados, o corte liso (1) do cap de transferência deve estar em linha com as roscas laterais (2).

Diâmetros e alturas

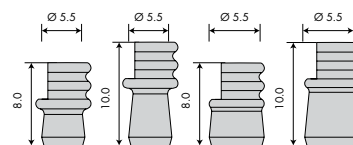

ANKYLOS® Análogo de Laboratório Standard, peça única

Para fabricação da prótese em laboratório

ANKYLOS® Análogo de Laboratório Standard Peça única

Escala 1.2:1



a / 1.5 / 4.0
a / 3.0 / 4.0
reto



a / 1.5 / 6.0
a / 3.0 / 6.0
reto



b / 1.5 / 4.0
b / 3.0 / 4.0
reto



b / 1.5 / 6.0
b / 3.0 / 6.0
reto

Ref.	3104 5140	3104 5150	3104 5160	3104 5170
------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Análogo de Laboratório Standard duas peças permanece disponível sob encomenda

Escala 1.2:1



a / 1.5 / 4.0
a / 3.0 / 4.0
15°



a / 1.5 / 6.0
a / 3.0 / 6.0
15°



b / 1.5 / 4.0
b / 3.0 / 4.0
15°



b / 1.5 / 6.0
b / 3.0 / 6.0
15°

Ref.	3104 5142	3104 5152	3104 5162	3104 5172
------	-----------	-----------	-----------	-----------

**ANKYLOS® Coping de Enceramento Standard²⁰
reto e 15°, para coroas unitárias**



com
retenções
internas



Escala 1.2:1

a / 1.5 / 4.0
a / 3.0 / 4.0

a / 1.5 / 6.0
a / 3.0 / 6.0

b / 1.5 / 4.0
b / 3.0 / 4.0


b / 1.5 / 6.0
b / 3.0 / 6.0

Ref.	3104 5180	3104 5190	3104 5200	3104 5210
------	-----------	-----------	-----------	-----------

**ANKYLOS® Coping de Enceramento
Standard**

- Para enceramento de coroas unitárias para pilares standard retos e angulados
- Orifícios oclusais e laterais para supra-estruturas retidas por parafuso
- Retenções para impedir rotação
- Também para restauração cimentada

**ANKYLOS® Coping de Enceramento Standard para pró-
teses múltiplas²⁰ reto e 15°, múltiplas**

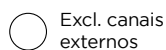

Excl. canais
externos



Escala 1.2:1

a / 1.5 / 4.0
a / 3.0 / 4.0

a / 1.5 / 6.0
a / 3.0 / 6.0

b / 1.5 / 4.0
b / 3.0 / 4.0

b / 1.5 / 6.0
b / 3.0 / 6.0

Ref.	3104 5182	3104 5192	3104 5202	3104 5212
------	-----------	-----------	-----------	-----------

**ANKYLOS® Coping de Enceramento
Standard para próteses múltiplas**

- Para fabricação de próteses múltiplas para pilares standard retos e angulados
- Orifícios oclusais e laterais para supra-estruturas parafusadas
- Também para restauração cimentada

**ANKYLOS® Parafuso de
Fixação Oclusal, curto⁴**

**ANKYLOS®
Parafuso de
Retenção Lateral
Sextavado
M 1 x 0.26⁶**



Escala 1.2:1

Ref.	3105 6022	3105 6051
------	-----------	-----------

INSTRUMENTOS

**Instalação de Próteses Unitárias
ou Múltiplas com Parafuso de Fixação
Oclusal ou Lateral:**

Chave sextavada de 1.0 mm,
torque recomendado 10 Ncm

SynCone® C/



Ângulo cônico 5°

- Geometria unificada para mandíbula e maxila
- Independente do número de implantes

Angulações adicionais

- 7,5° para alinhamento mais preciso na mandíbula
- 22,5° e 30° projetados especialmente para a maxila
- Todas as angulações disponíveis em todas as alturas de gengiva para maior flexibilidade

Medidor de paralelismo com assistente de rotação

- A chave de posicionamento pode ser travada no eixo para simplificar o alinhamento do pilar com o medidor paralelo

Cap cônico também sem retenção

- Pronta para cimentação na estrutura metálica imediatamente

Parafuso de Selamento para pilar reto

- Mais fácil do que resina para cobertura do canal do parafuso

ANKYLOS® Formador de Sulco C/ D 4.2⁴

				
Escala 1.2:1	GH 0.75	GH 1.5	GH 3.0	GH 4.5
Ref.	3102 2510	3102 2512	3102 2514	3102 2516

TOMADA DE IMPRESSÃO:



Não há tomada de impressão ao realizar carga imediata.

EM IMPLANTES OSSEointegrados A IMPRESSÃO É FEITA NO NÍVEL DO IMPLANTE:

Transfer abutment Balance C/.

AO TROCAR O PROVISÓRIO DE LONGO PRAZO PELA RESTAURAÇÃO DEFINITIVA, A TRANSFERÊNCIA OCORRE NO NÍVEL DO PILAR:

Cap cônico SynCone® com retenção usado como cap de transferência.

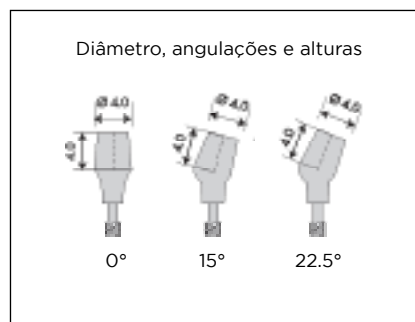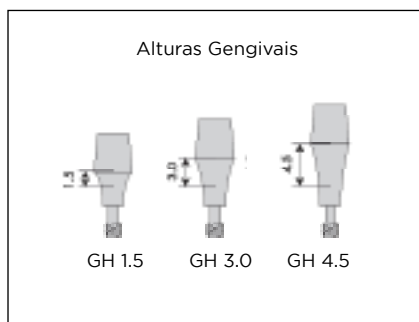

Ankylos® Pilar SynCone® C/ 4

Altura do Sulco 1.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0



A 7.5



A 15



A 22.5



A 30

Ref.	3102 2110	3102 2112	3102 2114	3102 2116	3102 2118
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Altura do Sulco 3.0



Escala 1.2:1

Angulação



A 0



A 7.5



A 15



A 22.5



A 30

Ref.	3102 2120	3102 2122	3102 2124	3102 2126	3102 2128
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Altura do Sulco 4.5



Escala 1.2:1

Angulação



A 0



A 7.5



A 15



A 22.5



A 30

Ref.	3102 2130	3102 2132	3102 2134	3102 2136	3102 2138
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ANKYLOS® Parafuso de Cobertura para Pilar SynCone® C/ reto 5°

ANKYLOS® Tampa Cônica Degulor® para Pilar SynCone® 5°

Escala 1.2:1



Ref.	3102 2198	3102 2199
------	-----------	-----------

Guia de Paralelismo SynCone®

Luva para polimerização para Syncone

Escala 1.2:1



Ref.	3103 3611	3102 1405
------	-----------	-----------

Ankylos TiBase® C/X

Escaneamento digital

INSTRUMENTOS

Instalação do pilar TiBase:

- Chave sextavada 1.0 mm
- Torque recomendado 15 Ncm



C/ GH1 S

Ref.	6586528	6586536
------	---------	---------



C/ GH2 S



/X GH1 S

Ref.	6586544	6586551
------	---------	---------



/X GH2 S

Instrumentos Protéticos

ANKYLOS® Kit Protético Mini

ANKYLOS® Kit Protético

Escala Reduzida



Ref.	3103 6165	3103 6120
------	-----------	-----------

ANKYLOS® Kit Protético Standard

3103 6150

Conteúdo do Kit Protético:	3103 6165 (mini)	3103 6120	3103 6150 (Standard)
Adaptador para Chave Manual, Ø 7 mm		■	■
Instrumento de remoção para Parafuso de Selamento, curto		■	■
Instrumento de remoção para Parafuso de Selamento, longo		■	■
Chave 1.6 mm fenda		■	■
Chave sextavada, 1.0 mm		■	■
Inserção de chave, 1.0 mm fenda		■	■
Chave de posicionamento para Pilares pré-angulados		■	■
Chave sextavada para Catraca Protética, 1.0 mm, 15 Ncm	■	■	■
Chave sextavada para Catraca Protética, 1.8 mm, 25 Ncm		■	
Chave sextavada para Catraca Protética, 1.0 mm, curto , 10 Ncm		■	■
Chave para Catraca Protética para Pilares a, reto (Standard), 25 Ncm		■	■
Chave para Catraca Protética para Pilares b, reto (Standard), 25 Ncm		■	■
Catraca Protética	■	■	■
Dispositivo de montagem	■	■	■

Instrumentos Protéticos

ANKYLOS® Adaptador para Chave Manual⁶



Ø 7 mm

Ref.	3103 3410
------	-----------

ANKYLOS® Instrumento de remoção de parafusos de selamento⁶

Escala 1:1



curto



longo

Ref.	3103 3434	3103 3435
------	-----------	-----------

ANKYLOS® Chave Sextavada 1.0 mm⁶

Escala 1:1



para Parafusos Allen sextavados



curto

Ref.	3103 3455	3103 3456
------	-----------	-----------

ANKYLOS® Instrumento de ativação para Attachment Bola

Escala reduzida



ANKYLOS® Instrumento de desativação para Attachment Bola



ANKYLOS® Chave de inserção⁶

Chave de posicionamento

Order no.	3103 3501	3103 3502	3103 3485
-----------	-----------	-----------	-----------

Os instrumentos protéticos cobrem as necessidades de todas as supraestruturas. Como os instrumentos cirúrgicos, os instrumentos protéticos são feitos de material de alta qualidade, resistente à corrosão.

ANKYLOS® Instrumento de Remoção do Parafusos de Selamento

- Pode ser inserido com o Adaptador Chave Manual
- Instrumento para remoção segura de parafusos de selamento

**ANKYLOS® Dispositivo
de montagem para inserções
de catraca protética⁶**

ANKYLOS® Catraca Protética⁶

Escala 1:1



Ref.	3103 3632	3103 3630
------	-----------	-----------

sob encomenda

ANKYLOS® Chaves para Catraca protética⁶

Escala 1:1



Para
Pilares a

Para
Pilares b

Attachment
Bola

1.0 mm
sext.

1.0 mm
sext. longo

1.0 mm
sext. curto

1.8 mm
sext.

Para Pilares
a longo

Para Pilares
b longo

Ref.	3103 3621	3103 3622	3103 3623	3103 3625	3103 3628	3103 3626	3103 3627	3103 3633	3103 3634
------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**ANKYLOS®
Chave de torque
de laboratório⁶
torque 10 Ncm**

Escala
reduzida



Ref.	3103 3640
------	-----------

Política de Trocas:

Trocamos produtos mediante a apresentação da via/cópia da nota fiscal em que conste este produto e de um relatório padrão, com o motivo da troca e quais os produtos a serem trocados, assinado pelo cliente.

- Para realização de trocas é necessário apresentação da via/cópia nota fiscal em que conste o produto a ser trocado e um relatório padrão, com o motivo da troca e quais produtos a serem trocados, assinado pelo cliente;
- Efetuamos as trocas de produtos respeitando o mesmo grupo e família : implantes por implantes, pilares standard por pilares standard, pilares regular por pilares regular, formadores de sulco por formadores de sulco, componentes de laboratório por componentes de laboratório; instrumentos por instrumentos, etc.;
- Efetuamos a troca de implantes no prazo de 1 ano após a data de emissão da nota fiscal. Para pilares o prazo é de 2 anos;
- Os produtos enviados para troca precisam estar com validade superior a 12 meses;
- Os produtos já trocados, com nota fiscal de doação e remessa para empréstimo não podem ser trocados;
- Para realização da troca não pode haver nenhuma avaria na embalagem como : marcação a caneta, amassados, violação da etiqueta ou da caixa;
- O envio do produto para troca é de responsabilidade do cliente;
- O prazo para realização da troca é de até 48 horas a partir daí deve-se considerar o prazo de entrega;
- Os clientes que possuam alguma pendência financeira com a Dentsply Sirona deve regularizá-la para realização da troca.

Em caso de troca não retiramos a mercadoria.

Procedimento:

O produto deve ser enviado para Dentsply Sirona Implants com frete pago pelo cliente.

Os produtos devolvidos devem estar fechados em suas embalagens originais. Para envio, devem ser acondicionados de forma que não sejam danificados durante o transporte mantendo sua integridade até o recebimento dos mesmos em nossa empresa.

Não serão aceitos materiais: abertos, quebrados, vencidos, com etiquetas rasgadas, e que não venham acompanhados de cópia da nota fiscal e o relatório de solicitação, mencionando o motivo da troca e assinado pelo cliente.

- Nosso Sistema de Implantes é 100% garantido quando utilizados os componentes originais Dentsply Sirona Implants.

Materiais

Metais

Tipo	Índice	Composição
Titan	2	Ti grau 2, DIN EN ISO 5832-2
Titânio	3	Ti grau 4, DIN EN ISO 5832-2
Titânio	4	Ti6Al4V
Titânio	40	Ti6Al4V grau 5
Alumínio 5 AlMg3	5	AlMg3
Aço inoxidável	6	Aço Cirúrgico
Aço inoxidável	49	316L SS SS/303 SE
Aço inoxidável	51	316L SS
Permador® PDF*	11	Au: 60%, Pt: 39%, Ir: 1%
Degunorm®**	12	Au: 73,8%, Pt: 9,0%, Ag: 9,2%, Cu: 4,4%, Zn: 2,0%, Ir: 0,1%, In: 1,5%
Degulor® 3406	13	Au: 65,0%, Ag: 13,0%, Cu: 11,5%, Pt: 8,9%, Pd: 1,0%, Zn: 0,5%,
Permador®	14	Au: 60,0%, Pt: 24,9%, Pd: 15%, Ir: 0,1%
Polietileno/Alumínio	42	LDPE/6061 T6 Al
Poliamida/Polietileno/Aço inoxidável/Plástico	43	Nylon/LDPE/Ti6Al4V/Borracha de Silicone
Poliamida/Polietileno/Aço inoxidável/Plástico	44	Nylon/LDPE/303 SE SS/Borracha de Silicone
Alumínio	45	6061 T6 Alumínio
Latão/Polioximetileno	48	MS-002, DELRIN, 1/4"
Latão/Polisulfona	50	MS-013-1 POLISULFONA (3/8")

* TEC 12.1; ** TEC 16.7

Plástico

Tipo	Índice	Composição
Polioximetileno (POM)	20	
Polietereetercetona (PEEK)	24	
Silicone	26	
Silicone	47	Polioximetileno (POM)
Policarbonato	27	Polietereetercetona (PEEK)
Poliamida	41	Silicone
Polietileno/Alumínio	42	Silicone
Poliamida /Polietileno/Aço inoxidável/Plástico	43	Policarbonato
Poliamida /Polietileno/Aço inoxidável/Plástico	44	Poliamida
Polietileno	46	Polietileno/Alumínio
Latão/Polioximetileno	48	Poliamida /Polietileno/Aço inoxidável/Plástico
Brass/Polysulfone	50	Poliamida/Polietileno/Aço inoxidável/Plástico

Cerâmica

Tipo	Índice	Composição
Óxido de zircônio	32	ZrO ₂



Dentsply Implants Manufacturing GmbH. Rodenbacher Chaussee 4 – 63457 HANAU – Alemanha

Detentor da Notificação/Registro: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 – tel (11) 3046-2222 – CEP 13633-412 – Pirassununga/SP – CNPJ 31.116.239/0001-55. HYPERLINK “<http://www.dentsplysirona.com>”www.dentsplysirona.com – SAC: 0800 771 2226 – Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396.

ANVISA Nº 80196880216 (Família De Instrumentos Protéticos); ANVISA Nº 80196880218 (Implantes Odontológicos); ANVISA Nº 80196880226 (Instrumentos Cirúrgicos); ANVISA Nº 80196880227 (Componentes Protéticos De Plástico); ANVISA Nº 80196880228 (Abutments Protéticos De Titânio); ANVISA Nº 80196880308 (Componentes Protéticos Metálicos); ANVISA Nº 80196880309 (Ankylos Kit Protético); ANVISA Nº 80196880310 (Instrumentos Cirúrgicos Estéreis); ANVISA Nº 80196880311 (Ankylos Kit Cirúrgico Motor AB); ANVISA Nº 80196880313 (Ankylos Kit Protético Mini); ANVISA Nº 80196880320 (Ankylos Kit Protético Standard); ANVISA Nº 80196880323 (Componentes Protéticos De Implante Dentário Metal-Plástico); ANVISA Nº 80196880324 (Instrumentos Cirúrgicos Manuais Não Estéreis Reprocessáveis De Aço Inoxidável); ANVISA Nº 80196880338 (Instrumentos Cirúrgicos Não Estéreis Manuais Reprocessáveis); ANVISA Nº 80196880346 (Componentes Metálicos); ANVISA Nº 80196880349 (Componentes De Implante Odontológico Metálicos Não Estéreis); ANVISA Nº 80196880351 (TIBASE); ANVISA Nº 80196880355 (Família De Componentes Protéticos Metálicos De Uso Único); ANVISA Nº 80196880378 (Sistema De Pilares Attachment Bola Com Matriz);

Fabricante em conformidade com a Diretriz 93/42/EEC.

Modo de uso, condições de armazenamento, conservação, advertências e precauções: Vide Instruções de Uso.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Dentsply
Sirona