



DS Universal Stain e Glaze

Um sistema para todas
as suas necessidades

Diversas possibilidades de aplicação

As propriedades dos stains universais e dos glazes os tornam adequados para o uso em estruturas cerâmicas monolíticas, bem como em camadas intermediárias durante a estratificação de cerâmica, por exemplo, entre a queima de dentina e a queima de correção.

Os stains devem ser aplicados moderadamente e em finas camadas.

Tabela 1: Atribuição de grupo de cores

Grupo de Cores Vita	Bleach	A	B	C	D
DS Universal Stain	Stain 0	Stain 1	Stain 2	Stain 3	Stain 4

Tabela 2: Uso dos Stains de incisal

Stain	Cor do dente
Incisal Stain i1	A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, D2, D3, Bleach
Incisal Stain i2	A3.5, A4, C1, C2, C3, C4, D4



DS Universal Stain & Glaze

Um sistema para todas as suas necessidades

Universal Stain e Glaze são especialmente formulados com a máxima compatibilidade para satisfazer todas as suas necessidades em um único sistema de acabamento.

+ Eficiência final

+ Fácil de usar

+ Desempenho versátil

Coeficiente de Expansão Térmica (CET):

$7,5 \pm 0,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (25–500 °C)

Dentsply Sirona Universal Stain e Glaze são indicados para as seguintes restaurações:

- + Celtra® Press – silicato de lítio reforçado com zircônia (ZLS)
- + Celtra® Duo – silicato de lítio reforçado com zircônia (ZLS)
- + Cercon® ht Zirconia
- + Cercon® xt Zirconia
- + Cerâmicas Kiss (exceto Duceragold®)
- + Cerâmica Ceramco 3®
- + Vários outros sistemas de estrutura e/ou revestimento de porcelana (conforme CET)

Os Stains Universais possuem um amplo espectro de cores que, em conjunto ao glaze de alta fluorescência e ao glaze padrão, compõe um único sistema para todas soluções:

- + 5 pigmentos de corpo
- + 2 pigmentos para incisais
- + 14 pigmentos de efeito
- + 2 Glazes:
 - Glaze padrão, para ser usando em sistemas cerâmicos que já possuem fluorescência natural
 - High-Flu Glaze, para ser usado em sistemas cerâmicos que não possuem fluorescência natural suficiente

Stains de corpo



Stains para incisal



Stains de efeito




Conceito de cores 6 para 16

Os stains universais oferecem uma opção que atende 100% das cores utilizando uma simples combinação de stains, agilizando os fluxos de trabalho do laboratório, aumentando a eficiência e economizando os custos de estoque. Alcance todas as 16 cores VITA classical A1-D4¹ usando apenas 6 stains base em Celtra® ou estruturas de zircônia Cercon®.

Celtra



Cercon

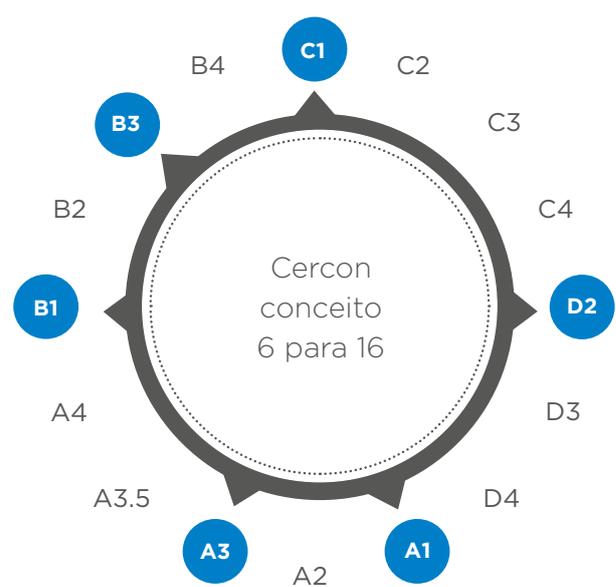

DS Universal Stain Crème melhora o aspecto incisal nesta ponte anterior de 3 elementos de Celtra Press.



High Flu Universal Glaze melhora de forma rápida e fácil a reprodução de cores nesta coroa monolítica de Cercon xt.

Guias de maquiagem fáceis de seguir para Celtra Duo, Celtra Press, Cercon ht e Cercon xt estão disponíveis em dentsplysirona.com/ceramics.

Um único sistema de acabamento para todas as suas necessidades

DS Universal Stain e Glaze é um sistema de maquiagem abrangente e altamente versátil, projetado com um espectro completo de opções de cores para atender a todas as necessidades. A ampla compatibilidade faz com que seja possível o uso de apenas um único sistema de acabamento no laboratório.



Eficiência final

- + A ampla compatibilidade do material universal elimina vários sistemas de acabamento em seu laboratório

Fácil de usar

- + O formato preferido de gel simplifica o treinamento e facilita a obtenção de um resultado consistente

Desempenho versátil

- + Capaz de ser usado de forma interna e externa para obter efeitos altamente individualizados

Stains de corpo		
DS Universal Body Stain - S0	5g	13330020001
DS Universal Body Stain - S1	5g	13330020002
DS Universal Body Stain - S2	5g	13330020003
DS Universal Body Stain - S3	5g	13330020004
DS Universal Body Stain - S4	5g	13330020005
Stains de incisal		
DS Universal Incisal Stain - i1	5g	13330030001
DS Universal Incisal Stain - i2	5g	13330030002
Stains de efeito		
DS Universal Stain - White	5g	13330010001
DS Universal Stain - Crème	5g	13330010002
DS Universal Stain - Sunset	5g	13330010003
DS Universal Stain - Copper	5g	13330010004
DS Universal Stain - Khaki	5g	13330010005
DS Universal Stain - Olive	5g	13330010006
DS Universal Stain - Mahogany	5g	13330010007
DS Universal Stain - Violet	5g	13330010008
DS Universal Stain - Raspberry	5g	13330010009
DS Universal Stain - Purple	5g	13330010010
DS Universal Stain - Grey	5g	13330010011
DS Universal Stain - Chestnut	5g	13330010012
DS Universal Stain - Blue	5g	13330010013
DS Universal Stain - Pink	5g	13330010014
Glaze		
DS Universal Glaze	5g	13330040001
DS Universal Glaze - High Flu	5g	13330040002



 Dentsply Sirona Prosthetics - 570 West College Avenue, York, PA 17401, Estados Unidos
 Registrado por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633-412 - Pirassununga/SP
 CNPJ 31.116.239/0001-55. Indústria Brasileira - www.dentsplysirona.com/ceramics - Central de Relacionamento: 0800 771 2226
 Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396.
 Registro ANVISA nº 80196880322 (Dentsply Sirona Stain e Glaze - Porcelana/ Cerâmica Odontológica).

 Conteúdo da embalagem, modo de preparo, condições de armazenamento, conservação, advertências e precauções: Vide Instruções de Uso.

© 2018 Dentsply Sirona Inc. Todos os direitos reservados.