


AH Plus Jet®


Cimento Endodôntico para Canais Radiculares - Seringa misturadora

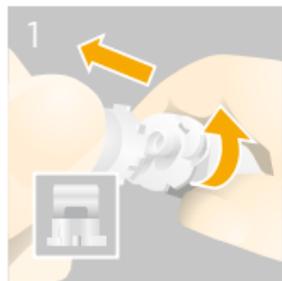

Remova a tampa girando 90 graus no sentido anti-horário e puxe-a.



Para garantir uma proporção de mistura adequada, dispense uma pequena quantidade de pasta da seringa antes da primeira aplicação clínica.

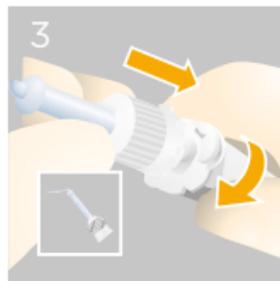

Prenda a ponta da seringa misturadora, alinhando o entalhe. Em seguida, gire a ponta 90 graus no sentido horário.




A ponta intra oral pode ser girada e o ângulo ajustado.

AH Plus Jet®

Cimento Endodôntico para Canais Radiculares - Seringa misturadora



Para uso intra oral, recomenda-se cobrir a seringa misturadora AH Plus Jet® com uma barreira protetora.

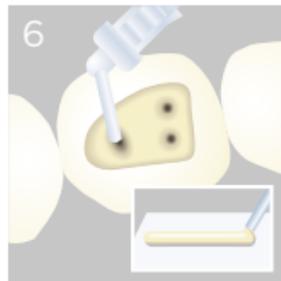

O cimento pode ser aplicado diretamente no orifício do canal ou expelido em uma superfície adequada para a realização da mistura.



Após aplicação do cimento, a ponta misturadora e a ponta intra oral devem ser descartadas.



Cuidado, consulte instruções de uso

Dentsply DeTrey GmbH. De-Trey-Str. 1. 78467 Konstanz ALEMANHA. Importado e distribuído por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633-412 - Pirassununga/SP - Brasil - CNPJ 31.116.239/0001-55. SAC: 0800 771 2226 - Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396. Registro ANVISA nº 10186370111 - Selante AH Plus (Selante Para Canal Radicular)

© 2019 Dentsply Sirona, Inc.

 Dentsply
Sirona