

**+
WE
KNOW
ENDO.**

MAILLEFER

TruNatomy™

True, Natural, Anatomy



**Dentsply
Sirona**

Instrumentação

Para a maioria dos casos



ReadySteel
K-File
10

Trunatomy
Agulha de
irrigação

* lançamento em breve

Explore 2/3 do canal na presença de uma solução irrigadora.



TruNatomy
Orifice Modifier
20.08

Use movimentos suaves de entrada e saída de amplitude de 2-5 mm até que o terço coronal seja modelado.



ReadySteel
K-File
10

Trunatomy
Agulha de
irrigação

* lançamento em breve

Explore novamente com o auxílio de uma solução irrigadora para determinar o comprimento de trabalho do canal, mantendo a irrigação.

Protocolo básico do sistema TruNatomy




TruNatomy
Glider
17.02v



Trunatomy
Agulha de
irrigação

* lançamento em breve

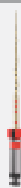


TruNatomy
Prime
26.04v

Avance passivamente para o comprimento de trabalho com amplitudes suaves. Não realize movimento de escovação. Recapitule e irrigue a cada lima TruNatomy.

Configurações do motor: 500 rpm | 1.5 Ncm

Opcional

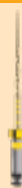

TruNatomy
Small
20.04v



TruNatomy
Medium
36.03v

Protocolo básico do sistema TruNatomy

Opções de Obturação

Para a maioria dos casos



Ponta de papel
absorvente
TruNatomy Prime



Guta Percha
TruNatomy
Conform fit Prime

Opcional



Ponta de papel
absorvente
TruNatomy
Small e Medium



Guta Percha
TruNatomy
Conform fit
Small e Medium



Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3, CH-1338
Ballaigues, Switzerland
dentsplysirona.com

Files, gutta-percha, paper points



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18, CH-1800
Vevey, Switzerland

Irrigation Needle

Importado por: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 - CEP 13633-412 - Pirassununga/SP - CNPJ 31.116.239/0001-55. Indústria Brasileira - www.dentsplysirona.com - Central de Relacionamento: 0800 771 2226 - Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi - CRQ-SP: 04208396. Limas de Níquel Titânio Estéreis (Rotatórias) - ANVISA Nº 80196880421 - Pontas de Papel Absorvente TruNatomy™ - ANVISA Nº 80196880438 - TruNatomy™ Conform Fit™ Gutta-Percha - ANVISA Nº 80196880442