




E-BOOK

CASOS CLÍNICOS

CASO

Paciente indicado para retratamento do dente 37, portador de abcesso periapical crônico como provável diagnóstico clínico e radiográfico. Na primeira sessão após anestesia e abertura coronária, foi usado Reciproc R25 M-Wire para desobstrução do material obturador. Então realizada a odontometria eletrônica com instrumento manual #10. Com irrigação com hipoclorito de sódio 2,5% o mesmo instrumento Reciproc R25 alcançou um milímetro a mais em todos os canais fazendo a limpeza foraminal.

Após irrigação intercalada com hipoclorito de sódio 2,5% e EDTA 17%, os canais foram secos e preenchidos com hidróxido de cálcio, que permaneceu por duas semanas. Então os canais foram obturados usando cimento AH Plus Jet e cones Reciproc R25 calibrados com comprimento de trabalho. Paciente retornou à clínica após seis meses para radiografia de controle onde foi constatado o reparo da lesão periapical.

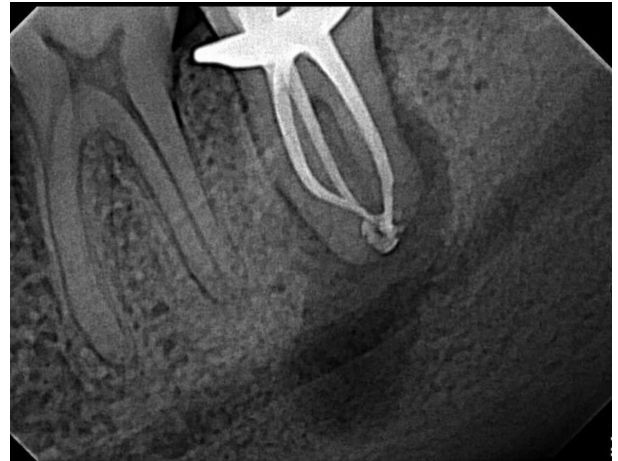



Prof Bráulio Pasternak Junior

Graduação: Odontologia (UFSC) 1994.
Especialização em Endodontia (UFSC) 1996 - 1997

Mestrado em Endodontia (UFSC) 1998 - 1999
Doutorado em Endodontia (Universidade de Ribeirão Preto) 2006 - 2008

Titular da cadeira 03 da Academia Catarinense de Odontologia

Detentor da notificação: DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. Rua José Francisco de Souza, 1926 – Tel.: (11) 3046-2222 - CEP 13633-412 – Pirassununga/SP – CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira – www.dentsplysiro-na.com – SAC: 0800 771 2226 – Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396 - ANVISA nº 80196880318 (Limas Níquel Titânio estéreis reciprocantes). ANVISA nº 10186370111 (Selante AH Plus).